

Desinfectante de superfície para monitores de hemodiálise

Composição

100g de ClearSurf™ contêm:
9,2 g de diacetato de
Cocospropilendiaminguanidina
16 g de cloreto de benzalcônio

Propriedades

- Bactericida (incluindo BK), fungicida, e inativador de formas virais (HBV, HCV, HIV, Rotavírus);
- Tem uma rápida ação hepato-virucida. A inativação do HBV e HCV é atingida após 30 min. de exposição com uma diluição a 0.5% ou de 10 min. com uma diluição a 1%;
- É isento de odor;
- É isento de aldeídos ou fenóis e não forma aerossóis;
- Para além de desinfectante possui boas propriedades de limpeza sendo adequado também para pavimentos em PVC, linóleo ou vidro acrílico.

Manuseamento

O ClearSurf é utilizado diluído nas concentrações de: 0.25%, 0.5% ou 1%. A solução pronta-a-usar deve ser preparada diariamente.

Exemplos de concentrações e tempos de exposição:

Bactérias e fungos: 1% - 15 min; 0.5% - 1 h;
0.25% - 4 h
Inativação do HBV/HCV/HIV: 0.5% - 30 min; 1%
- 10 min
Inativação do Rotavírus: 0.25% - 15 min

Apresentação

Frascos de 2 litros / Caixas com 6 Frascos

